



Vasofix[®] Safety


Veilige perifere katheter met bijspuitpunt

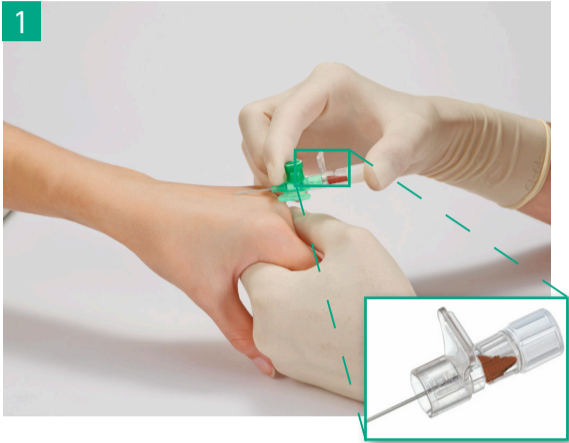

- Desinfecteer voor het aanprikken de punctieplaats volgens ziekenhuisprotocol.
- Door de universele puntslijping kan je onder elke hoek scherp aanprikken.
- Prik met de naald het bloedvat aan tot er bloed zichtbaar is in de flashbackkamer. Dit bevestigt een succesvolle punctie.

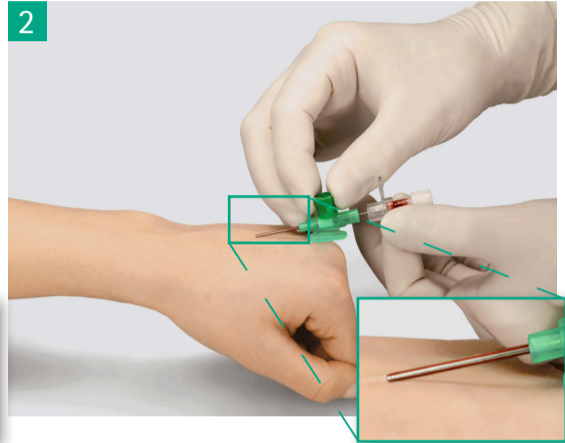

- Houd na de eerste flashback de naald op zijn plaats en schuif met de andere hand de katheter over de naald.
- De tweede flashback tussen de naald en de katheter is nu zichtbaar. Deze tweede flashback bevestigt dat de katheter in het bloedvat zit.
- Schuif nu de katheter verder op in het bloedvat.

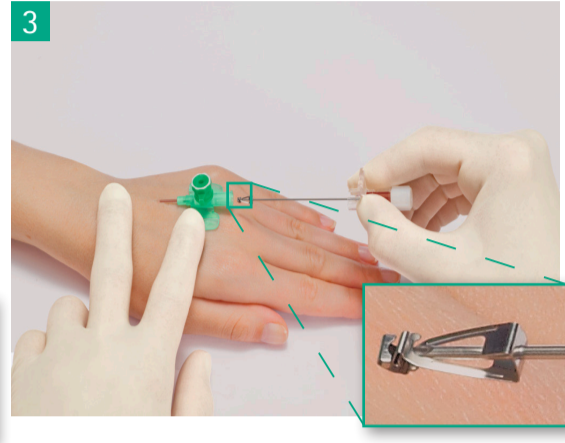

- Met de V-techniek ondersteun je de hub van de katheter en druk je het bloedvat af. Verwijder de naald in een vloeiende horizontale beweging.
- Het veiligheidsmechanisme wordt geactiveerd, waarbij de veiligheidsclip automatisch over de punt van de naald schuift.
- Gooi de naald weg in de naaldcontainer.




- Connecteer de infuuslijn en dek de punctieplaats af met een transparante afdekpleister volgens ziekenhuisprotocol.



- Connecteer de injectiespuit met een korte draaibeweging op het bijspuitpunt om bolusmedicatie toe te dienen.
- Het bijspuitpunt bevat een klep die zich automatisch opent en sluit. Het bijspuitpunt is alleen om te injecteren, aspireren is niet mogelijk.
- Sluit het bijspuitpunt na het injecteren.



Scan de QR code voor de instructievideo.

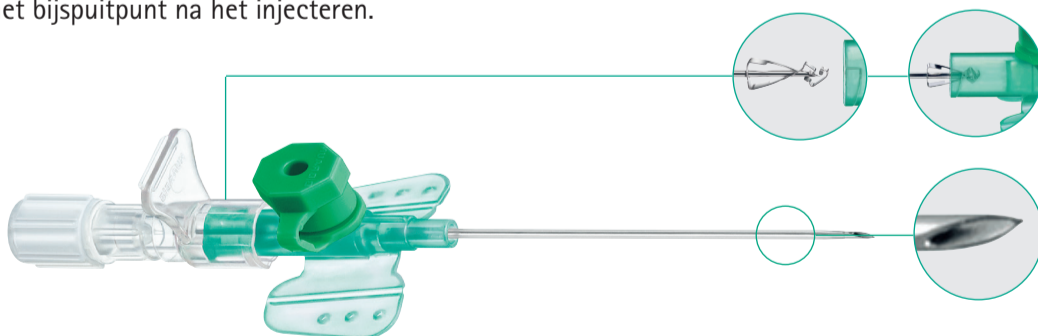

LET OP

- Makkelijk prikken onder een groot aantal hoeken.
- Zelfactiverende cliptechnologie bedekt naaldpunt automatisch na gebruik.
- Steek nooit een teruggetrokken naald terug in de katheter, de katheter kan beschadigen.
- Wanneer een succesvolle venapunctie uitblijft, verwijder dan eerst de naald waardoor het veiligheidsmechanisme zich activeert. Verwijder daarna de katheter.