

PRÉPARATION DES KITS DE DOUBLE EXTENSION CARESITE®

MÉTHODE AVEC COMBI STOPPER ET SERINGUE



1

Rassemblez tout le matériel nécessaire, tel que le kit d'extension Caresite®, le Combi Stopper, le tampon Softa®, la seringue Omniflush® et le bac à déchets.



2a

2a Retirez le bouchon protecteur du kit d'extension Caresite® et fermez le kit d'extension avec un Combi Stopper.

2b Utilisez une technique aseptique. Désinfectez une valve Caresite® en suivant le protocole national et/ou institutionnel.

2b



3

Activez la seringue Omniflush® et connectez-la à la valve Caresite® désinfectée.



4

Retirez l'air en tirant le piston de la seringue vers vous, afin de créer un vide.



5

Inversez la seringue (l'air se trouve à présent près du piston), afin de préparer tout le kit d'extension Caresite®.



6

Le processus de préparation est terminé. Retirez le Combi Stopper et connectez le kit d'extension Caresite® au cathéter intraveineux.



7

Commencez la thérapie par perfusion.

Pour plus d'informations sur la prévention des risques relatifs à

- La contamination microbologique
- La contamination particulaire
- L'embolie gazeuse
- La contamination chimique
- Les blessures par objets tranchants
- L'exposition au DEHP

dans le cadre de la thérapie par perfusion, veuillez consulter :



www.safeinfusiontherapy.com