


Intrafix® Handling Poster

Intrafix® Primeline en Intrafix® SafeSet in combinatie met containers en infuuszakken.

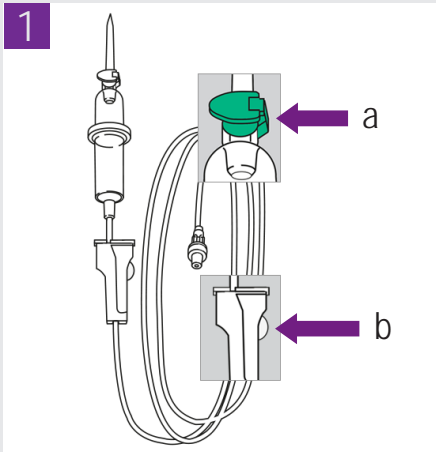


Haal de IV-set uit de verpakking.

Controleer:

a. dat de **groene luchtinlaat gesloten is**


b. de rollerklem in open positie staat.

Hint: Het is belangrijk dat de **rollerklem open** staat om mogelijke overdruk in de container/infuuszak tijdens het aanprikken te laten verwijderen.

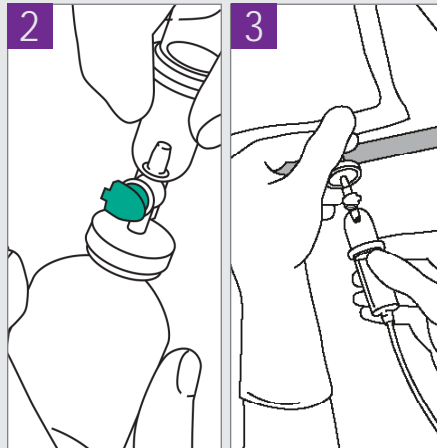


Prik de container/infuuszak aan op de wijze zoals weergegeven in de afbeeldingen.

Hint: Indien wordt aangeprikt met de vloeistof onderaan is er risico dat er vloeistof in het luchtkanaal van de spike komt.

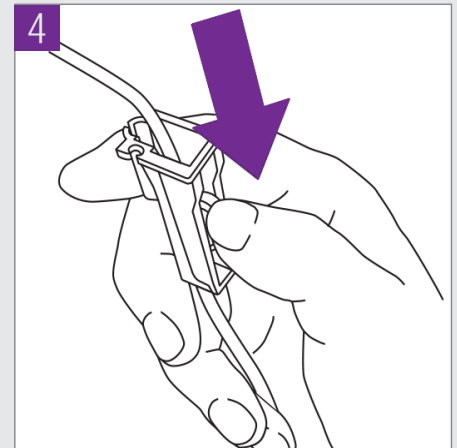


Sluit de rollerklem.

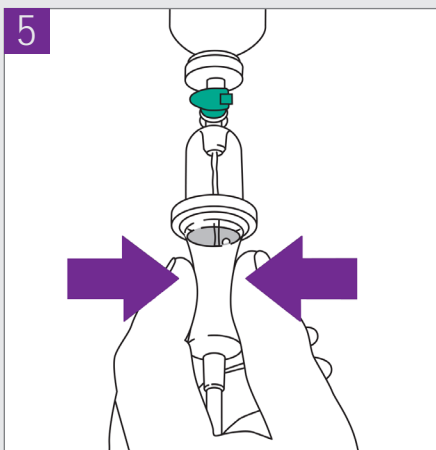


Hang de container/infuuszak op en vul de druppelkamer door op **het onderste gedeelte van de kamer te drukken**.

Doe dit totdat de vloeistof de ring bereikt heeft.

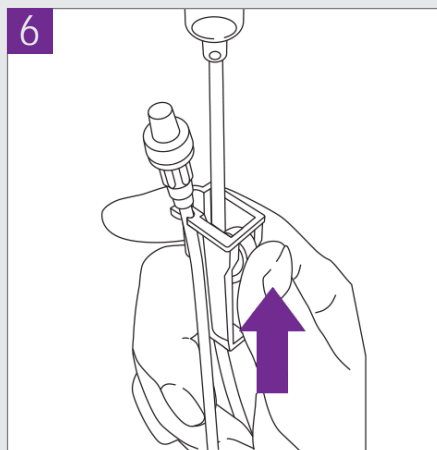

Open de rollerklem voor het ontluchten van de leiding.

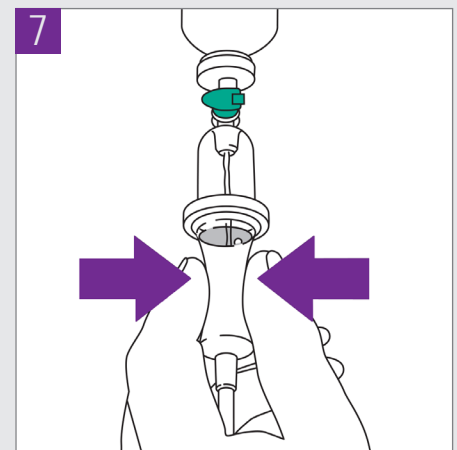

Druk nog 1 keer op de druppelkamer.

Hint: dit om een vlotte ontluchten te garanderen.