



Vasculaire toegang

Veilige perifere intraveneuze katheters

Safety is not a choice!

Kies daarom een intraveneuze katheter met een passief veiligheidssysteem van B. Braun


Passieve veiligheidssystemen zijn systemen die automatisch activeren, zonder extra handeling. Bij actieve veiligheidssystemen moet de eindgebruiker eerst een handeling verrichten voordat het veiligheidsmechanisme activeert. Passieve veiligheidssystemen zijn bewezen effectiever in het beschermen tegen prikaccidenten.

Producten

- Introcan Safety® 3: de nieuwste generatie intravasculaire katheter, gelijk aan Introcan Safety® met als extra eigenschappen een flow controle septum (je hoeft niet meer af te drukken), grotere vleugels en een aangepast stabilisatieplatform.
- Introcan Safety®: onze intravasculaire katheter zonder bijspuitpunt, met of zonder vleugels.
- Vasofix® Safety: onze intraveneuze katheter met vleugels en een bijspuitpunt.

Website voor experts: www.bbraunforsafety.com

Deze website bevat Engelstalige wetenschappelijke documentatie die ingaat op acht onderwerpen binnen het thema 'risico's tijdens intraveneuze toedieningen'. De onderwerpen zijn:

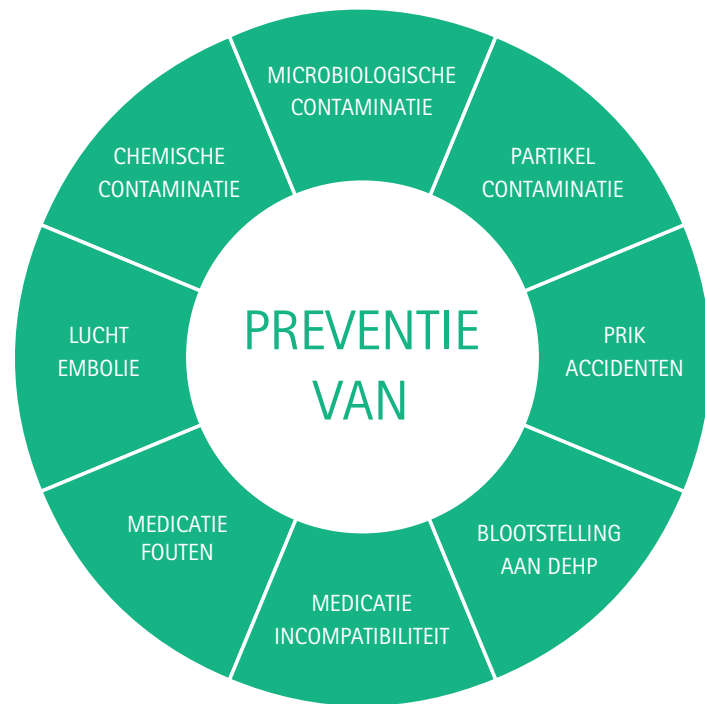

Intraveneuze katheters



Introcan Safety® 3



Introcan Safety® 3 arterieel



Introcan Safety®



Introcan Safety® Deep Access



Introcan Safety®
pediatrie/neonatologie



Vasofix® Safety

Accessoires



Medibox®

Eigenschappen intraveneuze katheters


Introcan Safety® 3




Introcan Safety® 3 arterieel





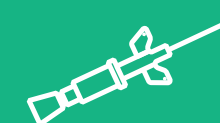



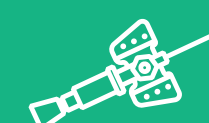





Introcan Safety®





Vasofix® Safety





	Passief veiligheidssysteem Een veiligheidssysteem dat automatisch activeert. Altijd bescherming tegen prikaccidenten.	■	■	■	■
	Veiligheidsclip Zelfactiverende clip voor betrouwbare bescherming tegen prikaccidenten.	■	■	■	■
	Bloedcontrole septum Het septum voorkomt bloedlekkage van de katheter. Afdrukken van het bloedvat is niet meer nodig.	■	■	—	—
	Arterieel Geschikt voor arterieel gebruik. Voor continue bloeddrukmeting en continue toegang tot arterieel bloed voor monitoring.	—	■	—	—
	Vleugels Vleugels zorgen voor een stabiele ligging van de katheter. Ze voorkomen hiermee irritatie van het bloedvat. Introcan Safety® 3 heeft als enige flexibele vleugels die zich aanpassen aan het huidoppervlak voor optimaal patiëntencomfort.	■	■	■	■
	Dubbele flashback De 1e flashback van bloed (in de transparante kamer achterop de naald) bevestigt dat de naald in het bloedvat zit. De 2e flashback (tussen naald en katheter) bevestigt dat de katheter in het bloedvat ligt.	■	■	■	■
	Universele slijping van de naald De naalden hebben een drievlakslijping. Daardoor kunt u de naald gebruiken met een aanprikhoek van 15° tot en met 45°. Elke intravasculaire katheter van B. Braun heeft dezelfde aanprikhoek.	■	■	■	■
	Geschikt voor pediatrie/neonatologie Kleine, veilige uitvoeringen geschikt voor de allerkleinsten.	■	■	■	■
	Neonatologie Extra lengtematen voor neonatologie. Extra keuze voor deze specifieke doelgroep.	—	—	■	—
	Naaldvrij bijspuitpunt Naaldvrij bijspuitpunt voor een snelle en veilige (bolus)injectie zonder onderbreking van de intraveneuze toediening.	—	—	—	■
	PUR De katheter is vervaardigd uit 100% polyurethaan, een thermosensibel materiaal. Meer comfort voor de patiënt en minder Irritatie van het bloedvat.	■	■	■	■
	FEP De katheter is vervaardigd uit 100% fluoride ethylpropyleen.	—	—	■	■


Productspecificaties intraveneuze katheters


Introcan Safety [®] 3	Gauge	Katheterlengte (inch)	Katheterlengte (mm)	Katheter ø (mm)	Flowrate (ml/min)	Aantal per box	Artikelnummer
	24	3/4	19	0.7	22	50	4251127-01
	22	1	25	0.9	35		4251128-01
	20	1	25	1.1	65		4251129-01
	20	1 1/4	32	1.1	60		4251130-01
	18	1 1/4	32	1.3	105		4251131-01
	18	1 3/4	45	1.3	100		4251132-01
	16	1 1/4	32	1.7	195		4251136-01
	16	2	50	1.7	185		4251133-01
	14	1 1/4	32	2.2	325		4251135-01
	14	2	50	2.2	310		4251134-01

Introcan Safety [®] 3	Gauge	Katheterlengte (inch)	Katheterlengte (mm)	Katheter ø (mm)	Flowrate (ml/min)	Aantal per box	Artikelnummer
	Kathetermateriaal						
	FEP PUR						
	20	2	50	1.1	22	50	4251144-01 4251137-01


Introcan Safety [®]	Gauge	Katheterlengte (inch)	Katheterlengte (mm)	Katheter ø (mm)	Straight (S) of Wing (W)	Flowrate (ml/min)	Aantal per box	Artikelnummer
	Kathetermateriaal							
	FEP PUR							
		22	1	25	0.9	S	35	4252519-01 4251628-01
		22	1	25	0.9	W	35	4254511-01 4253540-01
		20	1	25	1.1	S	65	4252543-01 4251652-01
		20	1	25	1.1	W	65	4254546-01 4253574-01
		20	1 1/4	32	1.1	S	60	4252535-01 4251644-01
		20	1 1/4	32	1.1	W	60	4254538-01 4253566-01
		20	1 3/4	45	1.1	S	57	4252527-01 -
		18	1 1/4	32	1.3	S	105	4252560-01 4251687-01
		18	1 1/4	32	1.3	W	105	4254562-01 4253604-01
		18	1 3/4	45	1.3	S	100	4252551-01 4251679-01
		18	1 3/4	45	1.3	W	100	4254554-01 4253590-01
		16	1 1/4	32	1.7	S	215	4252586-01 4251709-01
		16	2	50	1.7	S	210	4252578-01 4251695-01
		16	2	50	1.7	W	210	4254570-01 4253612-01
		14	1 1/4	32	2.2	S	350	4251890-01 -
		14	2	50	2.2	S	345	4252594-01 4251717-01
		14	2	50	2.2	W	345	4254597-01 4253639-01

Introcan Safety [®] Deep Access	Gauge	Katheterlengte (inch)	Katheterlengte (mm)	Katheter ø (mm)	Flowrate (ml/min)	Aantal per box	Artikelnummer	
	Kathetermateriaal							
	FEP PUR							
		24	1 1/4	32	0.7	17	50	- 4251623-01
		22	2 1/2	64	0.9	24		- 4251622-01
		20	2 1/2	64	1.1	51		- 4251621-01
		18	2 1/2	64	1.3	85		- 4251620-01

Introcan Safety [®] pédiatrie/néonatalogie	Gauge	Katheterlengte (inch)	Katheterlengte (mm)	Katheter ø (mm)	Straight (S) of Wing (W)	Flowrate (ml/min)	Aantal per box	Artikelnummer	
	Kathetermateriaal								
	FEP PUR								
		22	1	25	0.9	S	35	50	4252519-01 4251628-01
		22	1	25	0.9	W	35		4254511-01 4253540-01
		24	0.55	14	0.7	S	26		- 4251607-01
		24	0.55	14	0.7	W	26		- 4251614-01
		24	3/4	19	0.7	S	22		4252500-01 4251601-01
		24	3/4	19	0.7	W	22		4254503-01 4253523-01

Vasofix [®] Safety	Gauge	Katheterlengte (inch)	Katheterlengte (mm)	Katheter ø (mm)	Flowrate (ml/min)	Aantal per box	Artikelnummer	
	Kathetermateriaal							
	FEP PUR							
		24	3/4	19	0.7	22	50	- 4269071S-01
		22	1	25	0.9	36		4268091S-01 4269098S-01
		20	1	25	1.1	65		- 4269217S-01
		20	1 1/4	33	1.1	61		4268113S-01 4269110S-01
		18	1 1/4	33	1.3	103		4268334S-01 4269330S-01
		18	1 3/4	45	1.3	96		4268130S-01 4269136S-01
		17	1 3/4	45	1.5	128		4268156S-01 4269152S-01
		16	2	50	1.7	196		4268172S-01 4269179S-01
		14	2	50	2.2	343		4268210S-01 4269225S-01

Productspecificaties accessoires

Medibox [®]	Inhoud	Verpakking	Artikelnummer
	Medibox [®] 0,7 L	10	9193405
	Medibox [®] 3 L	10	9193413
	Medibox [®] 5 L	10	9193421

B. Braun Medical N.V. | Lambroekstraat 5b | 1831 Diegem | België
+32 (0)2 712 86 50 | customercare.be@bbraun.com | www.bbraun.be

V06/2024

De informatie in deze brochure is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze brochure of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn.