


Infusomat[®]plus tubulure

Poster d'utilisation

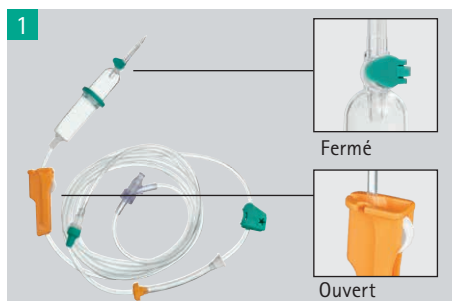


Retirer le matériel de perfusion de son emballage :

- Valve d'aération fermée
- Pince à roulette ouverte



- Percer le récipient de solution de perfusion en position verticale (par ex. flacon en verre, Ecoflac[®], etc.)
- Fermer la pince à roulette

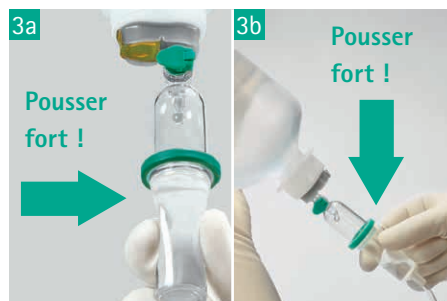

Régler le niveau de liquide :

- Remplir la chambre compte-gouttes jusqu'à l'anneau vert



- Ouvrir la pince à roulette
- Purger manuellement la tubulure



- Démarrer l'appareil et attendre le test automatique
- Ouvrir la porte de la pompe en tirant le levier vers l'avant



(Attention: de gauche à droite)

- 1 Mettre en place la tubulure Infusomat[®]plus : introduire la pince de sécurité verte dans le port vert puis appuyer (→ CLIC)
- 2 Placer le clip orange dans l'ouverture orange de la pompe
- 3 Pousser la tubulure de perfusion dans l'encoche à gauche et à droite vers l'arrière



- Fermer la porte de pompe à l'aide des deux mains en utilisant le levier tiré
- Suivre les indications à l'écran, **OUVRIRE LA PINCE À ROULETTE**
- Valider par OK. La pompe réalise un calibrage
- Suivre les indications à l'écran