

1 PRÉPARATION



Préparez le traitement sous flux laminaire.

2 PURGE DE LA TUBULURE



1. Si vous utilisez le Cyto-Set® Mix avec percuteur muni d'une prise d'air, fermez la prise d'air.
2. Percez le conteneur IV et purgez entièrement la tubulure.

3 CONNEXION DE LA SERINGUE



1. Fermez le clamp à proximité de la valve sans aiguille afin de diluer le médicament dans le conteneur et pas dans la tubulure du Cyto-Set® Mix.
2. Connectez la seringue préparée à la valve sans aiguille en utilisant l'ailette de préhension. La valve s'ouvre automatiquement au contact de la seringue.

4 AJOUT DU MÉLANGE



1. Injectez le médicament dans le conteneur.
2. Mélangez correctement le cytostatique en effectuant plusieurs aspirations. La valve se referme automatiquement lorsque vous retirez la seringue.

5 MARQUAGE DE LA VALVE



Placez un cône de fermeture (combi-stopper) rouge sur la valve pour indiquer qu'elle a été utilisée. Le clamp reste fermé.


6 TRANSPORT



1. Entrez dans un sachet labellisé adéquat.
2. Le système est prêt à être transporté jusqu'à la salle de soins.

Cyto-Set® Mix – Préparation

1 PERFORATION DU CONTENEUR

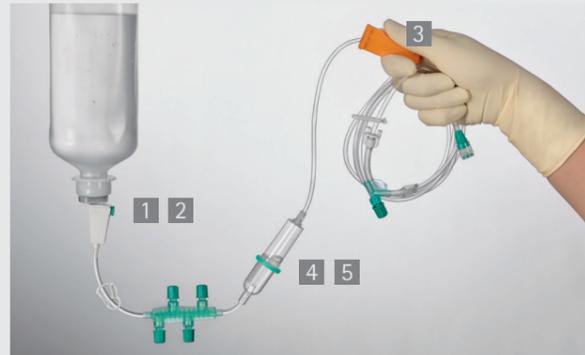

1. Fermez la prise d'air du percuteur.
2. Fermez le clamp à roulette.
3. Insérez le percuteur dans la poche.
4. Tenez la chambre compte-gouttes à l'envers et ouvrez le clamp à roulette. Remplissez la chambre compte-gouttes jusqu'au niveau de l'anneau vert.
5. Retournez la chambre compte-gouttes dans sa position initiale et appuyez une fois dessus afin d'activer le remplissage du système. Purgez entièrement le set.

2 PURGE DE LA TUBULURE



1. Si vous utilisez Cyto-Set® Infusomat® Space, tenez le segment spécifique de la pompe à l'envers. Purgez le système et connectez Cyto-Set® Infusion / Infusomat® Space au patient.
2. Ouvrez le clamp à roulette. La solution de rinçage commence à s'écouler.

3 CONNEXION DE LA PREMIÈRE TUBULURE



Retirez les capuchons de protection et connectez le Cyto-Set® Mix. Vissez le raccord vert du Cyto-Set® Mix sur la valve sans aiguille. Un « clic » tactile vous indique que les sets sont correctement connectés.

4 DÉMARRAGE DE LA PERFUSION DU MÉDICAMENT



1. Fermez le clamp du set IV.
2. Ouvrez le clamp du Cyto-Set® Mix.

5 RINÇAGE DU SET IV



1. Laissez le traitement couler. Fermez le clamp du Cyto-Set® Mix à proximité de la valve sans aiguille du set IV.
2. Pour rincer la tubulure, ouvrez le clamp du set IV principal.

6 CONNEXION DE LA DEUXIÈME TUBULURE



1. Fermez le clamp du set principal.
2. Ouvrez le clamp du Cyto-Set® Mix suivant.
3. Lorsque le set principal (à 4 voies d'entrée) est en place, vous pouvez connecter jusqu'à 4 Cyto-Set® Mix.

7 RINÇAGE



Rincez le set IV principal à chaque fois que vous changez de perfusion médicamenteuse.

8 ÉLIMINATION



Lorsque la dernière perfusion médicamenteuse est terminée, rincez à nouveau l'ensemble du set principal. Le système clos peut être déconnecté du site d'injection. **Le set est prêt à être éliminé en tant que système clos.**

Cyto-Set® AirStop – Application