



Poster Intrafix® - Instructions

Intrafix® Primeline et Intrafix® SafeSet en combinaison avec des containers/poches à perfusion.

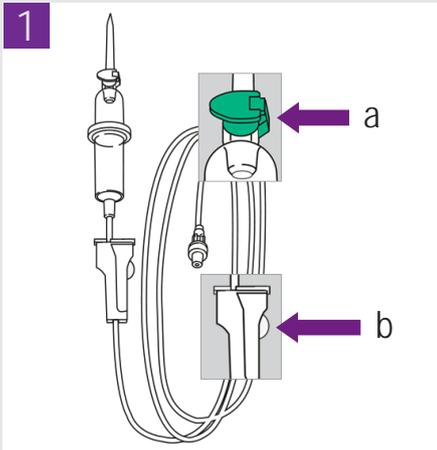


Retirez le set IV de l'emballage.
Vérifiez les points suivants:
a. la prise d'air verte doit être fermée
b. le clamp roulant doit être ouvert.
Astuce: il est important que le clamp roulant soit ouvert pour éviter une éventuelle surpression dans le contenant/poche à perfusion pendant la perforation.

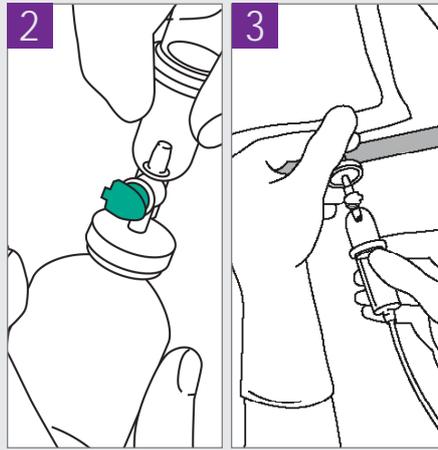


Perforez le container/poche à perfusion de la même manière qu'indiqué sur les images ci-dessus.


Astuce: si le liquide se trouve en premier en contact avec le trocard, il y a un risque que du liquide rentre dans le canal d'air du trocard.

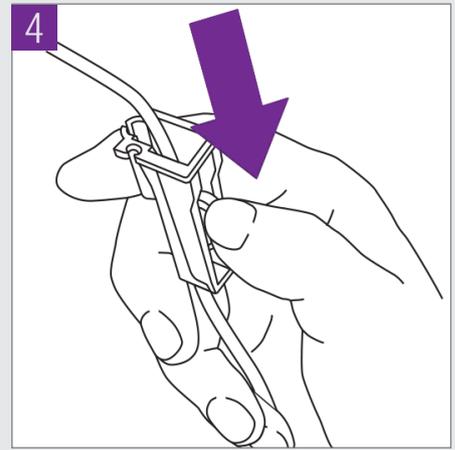


Fermez le clamp roulant.

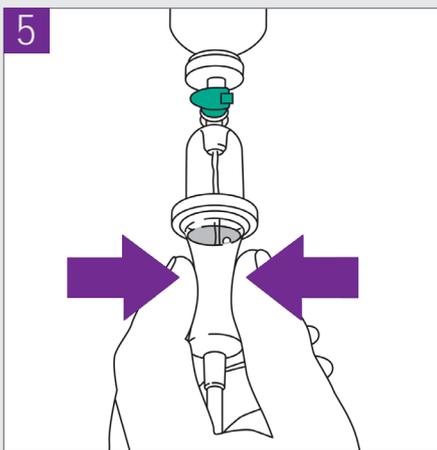

Retourner le container/poche de perfusion et remplissez la chambre compte-gouttes en pressant la partie inférieure de celle-ci jusqu'à ce que le liquide atteigne l'anneau.

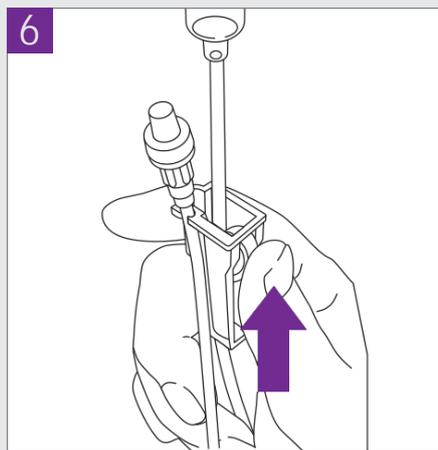

Ouvrez le clamp roulant afin de pouvoir purger la ligne.

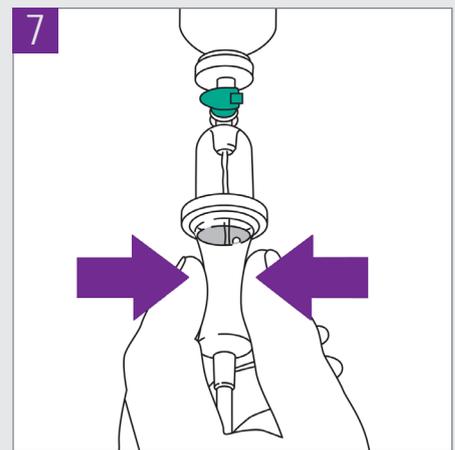

Pressez encore 1 fois la chambre compte-gouttes.

Astuce: ceci garantit une purge rapide.