

PRÉPARATION DES KITS DE DOUBLE EXTENSION CARESITE®

MÉTHODE AVEC SERINGUE DE RINÇAGE PRÉREMPLIE



1

Rassemblez tout le matériel nécessaire, tel que le kit d'extension Caresite®, la seringue Omniflush®, le tampon Softa® et le bac à déchets.



2

Utilisez une technique aseptique. Désinfectez les deux valves Caresite® en suivant le protocole national et/ou institutionnel.



3

Activez la seringue Omniflush® et connectez-la à l'une des valves Caresite®.



4

Purgez la première des deux valves du kit d'extension.



5

Connectez la seringue Omniflush® à la seconde valve Caresite®.



6

Purgez la seconde valve du kit d'extension.



7

Le processus de préparation est terminé. Retirez le bouchon protecteur du kit d'extension Caresite®.



8

Connectez le kit d'extension Caresite® au cathéter intraveineux.



9

Commencez la thérapie par perfusion.

