


A	B	C	12	D
Courbure de l'aiguille	Corps de l'aiguille	Pointe de l'aiguille	Longueur de l'aiguille	Précisions complémentaires
<b>S</b> 1/8 cercle	<b>R</b> rond	<b>T</b> diamant	Correspond à la distance entre la pointe de l'aiguille et la zone de sertissage, distance mesurée le long de l'aiguille en mm.	<b>f</b> aiguille "flat" (øaig = øfil)
<b>V</b> 1/4 cercle	<b>S</b> triangulaire	<b>N</b> mousse		<b>s</b> aiguille renforcée
<b>D</b> 3/8 cercle	<b>L</b> spatulé	<b>S</b> sternale		<b>ss</b> aiguille très renforcée
<b>H</b> 1/2 cercle	<b>G</b> trapézoïdal (Golf)	<b>C</b> micropointe		<b>v</b> aiguille sécable (break-off)
<b>F</b> 5/8 cercle		<b>MP</b> pointe de précision		<b>b</b> aiguille noire
<b>G</b> droite		<b>m</b> aiguille de microchirurgie		
<b>P</b> composite / progressive		<b>mV</b> microvasculaire		
<b>J</b> crochet				
<b>SK</b> ski				
Exemple :				
<b>H</b>	<b>R</b>	<b>C</b>	<b>26</b>	
HRC 26 : Aiguille 1/2 cercle à corps rond avec pointe triangulaire micropointe, longueur 26 mm.				

## Nomenclature des aiguilles B. Braun

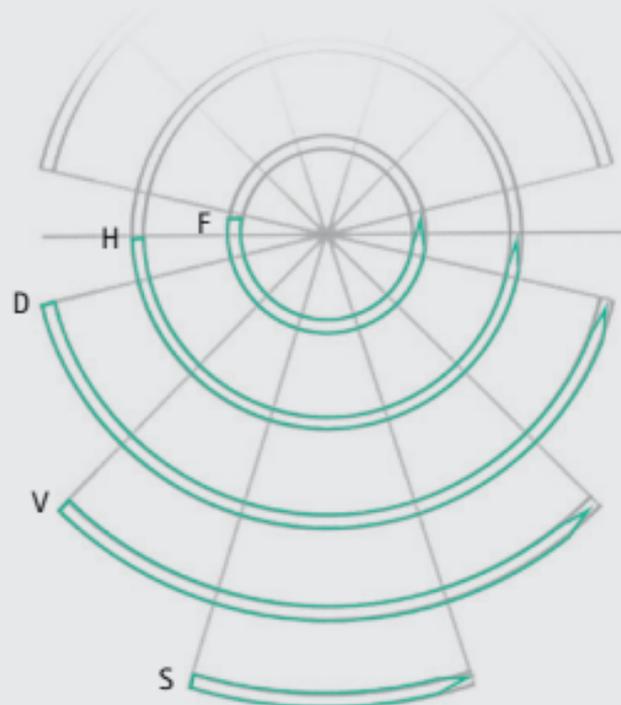

- S 1/8 cercle
- V 1/4 cercle
- D 3/8 cercle
- H 1/2 cercle
- F 5/8 cercle

Pour détacher l'aiguille du fil sans l'aide de ciseaux, tendre la suture en tirant dessus et saisir solidement l'aiguille dans le porte-aiguille. Un coup sec sur le porte-aiguille va alors détacher l'aiguille de la suture.

## Autres courbures

