

# Intrafix® SafeSet

## Gebruikerstips

### 1 AIRSTOP


De druppelkamer is onderaan voorzien van een airstop membraan. De Airstop zal enkel vloeistof doorlaten, geen lucht. Hierdoor zal de lijn nooit doorschieten met lucht indien de druppelkamer leeg is. De infusie zal automatisch stoppen.

**HINT:** Bij gebruik met een pomp zal de pomp een alarm genereren van zodra de druppelkamer leeg is.

### 2 PRIMESTOP

De primestop is geïntegreerd in het groene stukje. De primestop laat enkel lucht door, geen vloeistof. Hierdoor zal er geen medicatie vrijkomen tijdens het ontlichten.

Sluit na het ontlichten de rollerklem, verwijder de primestop en koppel de lijn aan.

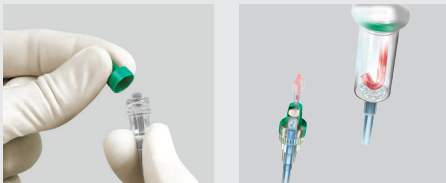

### 3 PARKEERPOSITIE

De rollerklem is voorzien van 2 parkeerposities.

- Het positioneren van de lijn
- Het veilig positioneren van de spike na gebruik. Trek vervolgens de lijn door de rollerklem voor een vaste fixatie.



### 4 STEL DE ROLLERKLEM IN

Om het gewenste debiet in te stellen, open de rollerklem van gesloten naar open positie, dus van beneden naar boven.

