

# Intrafix® SafeSet

## Guide d'utilisation


### 1 AIRSTOP

Le fond de la chambre compte-gouttes est muni d'une membrane Airstop. Grâce à l'Airstop, seul du liquide pourra passer, aucun air. Par conséquent, aucun air ne passera dans la ligne lorsque la chambre compte-gouttes est vide. La perfusion s'arrêtera automatiquement.

**ASTUCE:** Lors de l'usage d'une pompe, celle-ci génère une alarme dès que la chambre compte-gouttes est vide.

### 2 PRIMESTOP

Le Primestop est intégré dans le capuchon vert. Le Primestop laisse uniquement passer de l'air, pas de liquide. Par conséquent, aucun médicament ne s'échappera lors de la purge. Fermez le clamp roulant après la purge, retirez le Primestop et connectez la ligne.

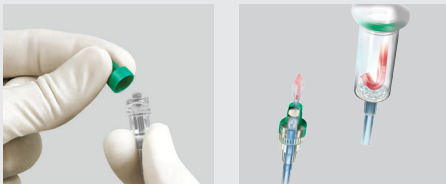

### 3 FIXATIONS

Deux possibilités de fixation sont prévues pour le clamp roulant:

- Le positionnement de la ligne
- Le positionnement sécurisé du trocard après usage. Tirez ensuite la ligne à travers le clamp roulant pour une fixation sûre.



### 4 AJUSTEMENT DU CLAMP ROULANT

Afin de régler le débit souhaité, faites glisser la roulette du clamp roulant de la position fermée à celle ouverte, donc de bas en haut.

