


URÉOFIX® 500 CLASSIC



2 systèmes de fixation intégrés

LE SYSTÈME URÉOFIX® 500 CLASSIC DISPOSE DE 2 SYSTÈMES DE FIXATION :

1. Un crochet amovible prémonté et intégré à l'arrière de la chambre de mesure.

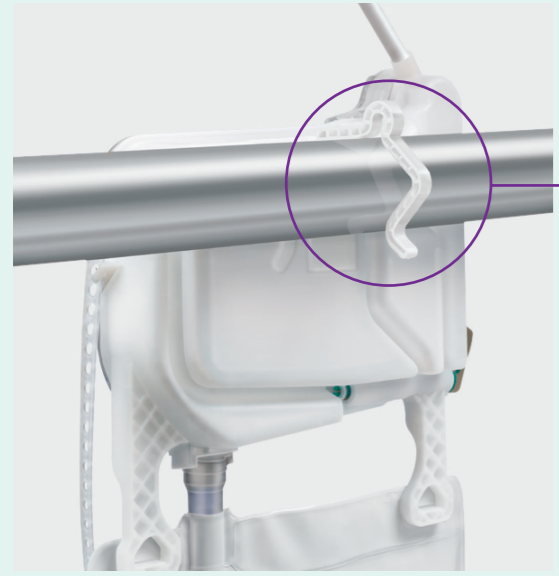

2. Deux attaches perforées prémontées sur le container.

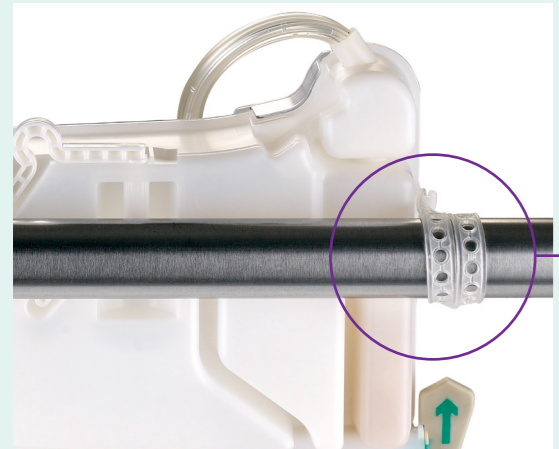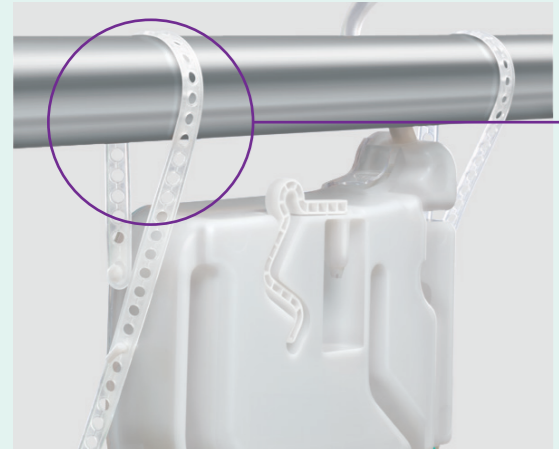

Produits et références

	Longueur tubulure	Pièces/boîte	Référence
SETS URÉOFIX® 500 CLASSIC AVEC SACS FERMÉS			
Uréofix® 500 Classic avec sac interchangeable de 1,5 L	120	10	4417910
	170	10	4417920
SETS URÉOFIX® 500 CLASSIC AVEC SACS VIDANGEABLES			
Uréofix® 500 Classic avec sac vidangeable prémonté de 2 L	120	10	4417930
	170	10	4417940
SACS DE RECHANGES URÉOFIX® 500 CLASSIC			
Sacs fermés Uréofix® 500	1,5 L	100	4417535
	3,5 L	100	4417543
Sacs vidangeables Uréofix® 500	2 L	100	4417551



URÉOFIX® 500 CLASSIC

MESURE DE LA DIURÈSE HORAIRE

B. Braun Medical S.A. | Lambroekstraat 5b | 1831 Diegem | Belgique
+32 (0)2 712 86 50 | customer-care.be@bbraun.com | www.bbraun.be

URÉOFIX® 500 CLASSIC

Sécurité du recueil

Uréofix® 500 classic est issu de la nouvelle technologie avec pour objectif d'apporter sécurité et confort pour le personnel soignant et ses patients :

- Risques d'infections réduits
- Sécurité du site de prélèvement sans aiguille
- Vidange rapide du container
- Mesure précise

DEHP FREE
LATEX FREE



Uréofix® 500 Classic - 2 L

Risques d'infections réduits

CHAMBRE DE PASTEUR

- Empêche la migration rétrograde des bactéries
- Empêche le reflux d'urine dans la tubulure grâce à la valve anti-reflux
- Equilibrage des pressions grâce aux 2 filtres d'air

Filtres d'air

Valve anti-reflux

① **SAC AVEC VALVE ANTI-REFLUX ET FILTRE D'AIR**

② **SITE DE PRÉLÈVEMENT URINAIRE SANS AIGUILLE**
Pouvant être utilisé 30 fois pour une plus grande sécurité.

③ **BOUCHON DE VIDANGE EN « CROIX »**
Pour éviter le contact avec le sol.

Vidange rapide du container et mesure précise

IDENTIFICATION DES POSITIONS D'OUVERTURE ET DE FERMETURE

PAS DE MANIPULATION SUPPLÉMENTAIRE POUR VIDANGER
Grâce au tuyau avec rainure permettant à l'urine de s'écouler librement et de se vider complètement dans le système.

LECTURE DES VOLUMES PRÉCISE ET CLAIRE
Grâce aux 3 compartiments gradués au ml près.