


# Surecan® Safety II


## Manipulation

### Technique de pose

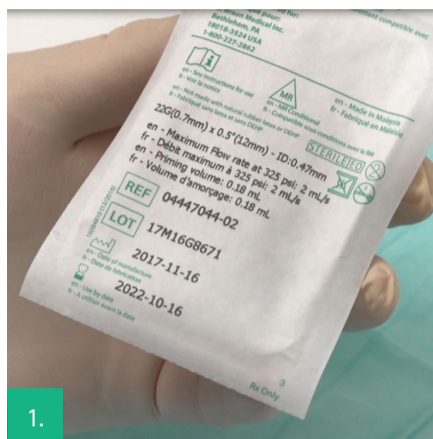


1.

Vérifiez la taille et l'emballage.  
Ouvrez l'emballage.

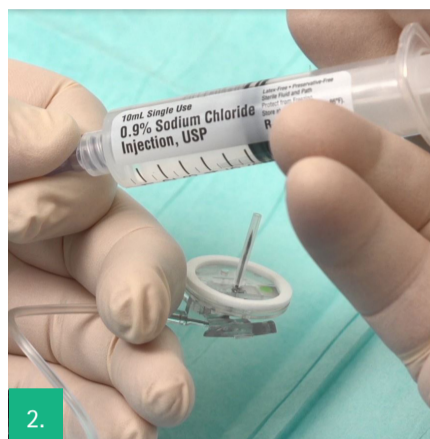


2.

Fixez une seringue de 10 ml contenant du chlorure de sodium (NaCl) à 0,9 % au connecteur Luer-lock. Remplissez l'ensemble et fermez le clamp.

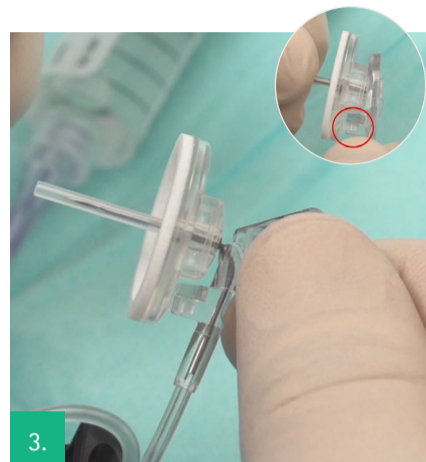

3.

Tenez la plaque de base d'une main et, de l'autre, pliez les ailettes l'une vers l'autre. Veillez à ce que la plaque de base ne se détache pas du clip. Si cela arrive, veuillez la reclipser à nouveau dans le clip.

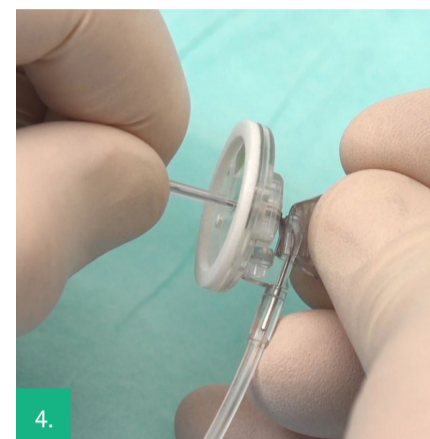

4.

Retirez le capuchon de l'aiguille.




5.

Désinfectez le site de la chambre implantable selon le protocole de l'hôpital. Palpez pour repérer le septum de la chambre implantable. Insérez l'aiguille perpendiculairement à celui-ci.




6.

L'aiguille est enfoncée jusqu'à toucher le fond de la chambre mais sans pression excessive. L'embase peut être positionnée sur la peau.

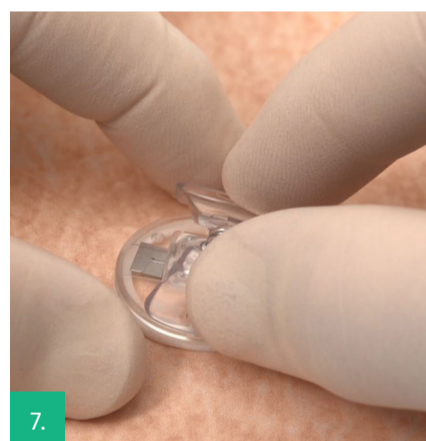

7.


Poussez les ailettes à plat vers la plaque de base. Vérifiez le reflux et le rinçage pulsé avant administration.

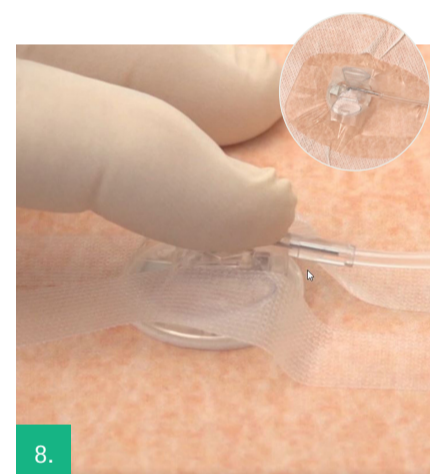

8.


Placez un pansement transparent et sécurisez le site conformément au protocole de l'établissement.

### Technique de retrait

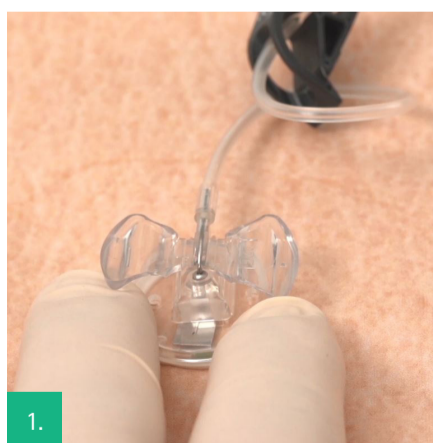


1.

Stabilisez la base de l'aiguille avec deux doigts.

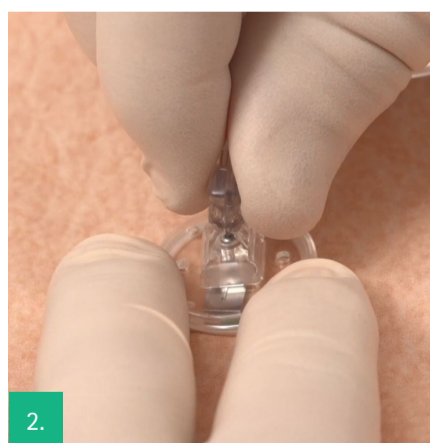

2.

Avec l'autre main, pliez les ailettes ensemble.

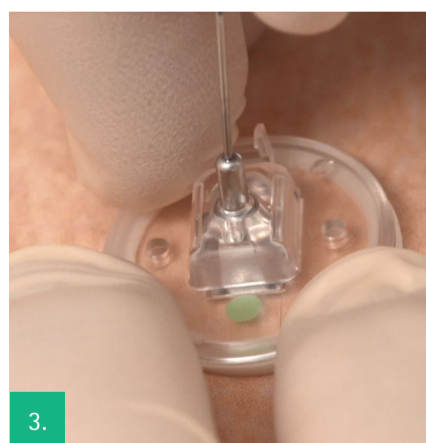

3.

Tirez les ailettes vers le haut jusqu'à ce que vous sentiez un blocage. L'aiguille est verrouillée en position de sécurité. Un point vert sur l'embase de l'aiguille confirme la mise en place du dispositif de sécurité.