


# SURECAN® SAFETY II


## RETRAIT DE L'AIGUILLE EN PRESSION POSITIVE

### 1 STABILISER LA BASE DE L'AIGUILLE

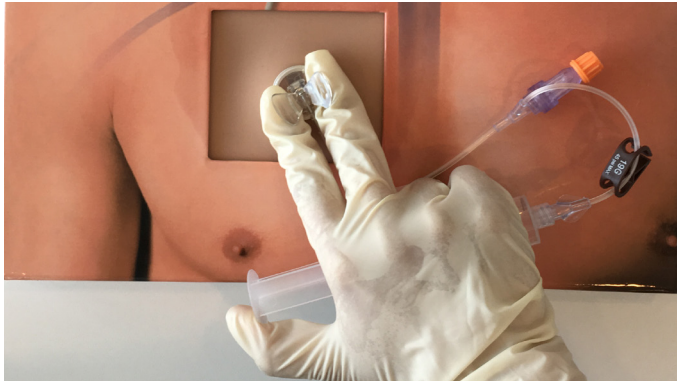


Avec une main, tenir la seringue préremplie d'une solution de NaCl à 0,9% dans la paume, tout en **stabilisant la base de l'aiguille avec deux doigts**. Le pouce est placé sur le piston de la seringue.

### 2 SAISIR LES AILETTES DE PRÉHENSION

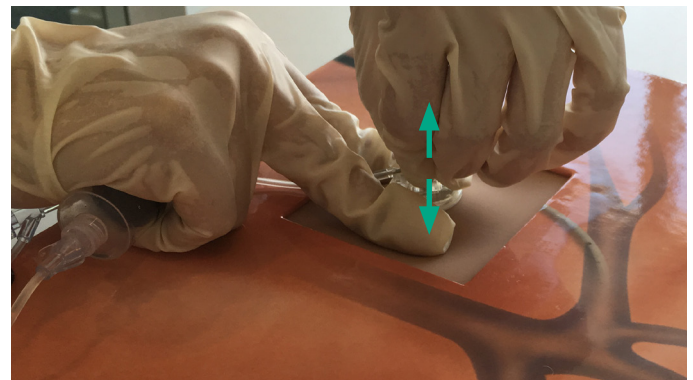

Avec la deuxième main, **saisir les ailettes de préhension**.

### 3 RETIRER L'AIGUILLE TOUT EN EXERÇANT UNE PRESSION POSITIVE

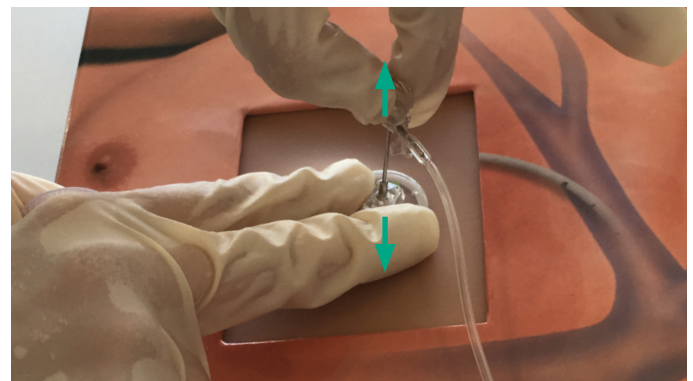

Avec la première main, exercer une pression positive en **appuyant de façon pulsée sur la seringue à l'aide du pouce**, tout en maintenant la base de l'aiguille avec l'index et le majeur. La deuxième main **retire l'aiguille en tirant fermement sur les ailettes** jusqu'à entendre un clic et jusqu'à l'apparition du point vert confirmant l'activation de la sécurité.