


# Surecan® Safety II

## Gebruikersinstructie


### Plaatsen




1. Controleer de juistheid van maat, uitvoering en verpakking. Open de verpakking.

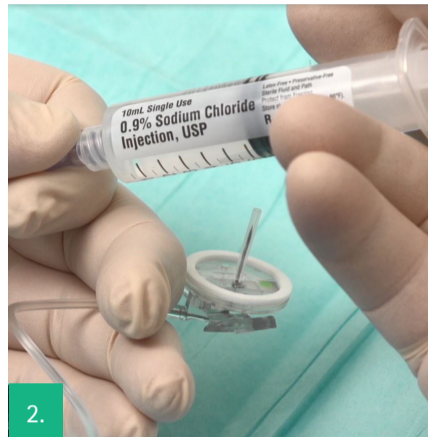

2. Sluit een spuit van 10 ml met NaCl 0,9% aan de op de Luer Lock connectie en vul de lijn. Sluit daarna de klem.

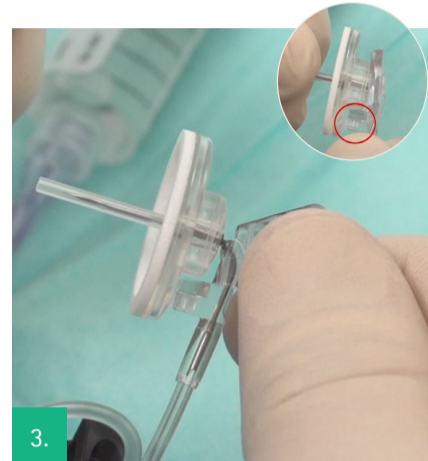


3. Houd met één hand de bodemplaat vast en buig met de andere hand de vleugels naar elkaar toe. Zorg dat daarbij de bodemplaat niet losraakt van de clip. Mocht de bodemplaat toch losraken klik deze dan terug in de clip.

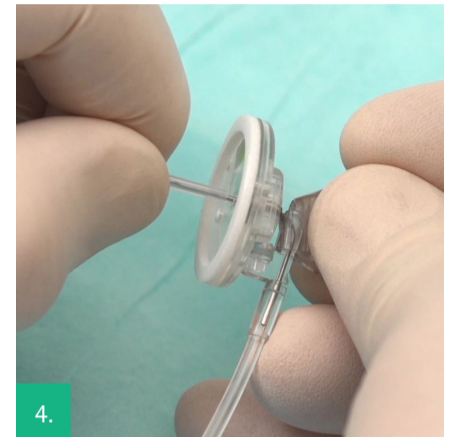


4. Verwijder de beschermhuls van de naald.




5. Desinfecteer de punctieplaats volgens protocol. Lokaliseer de poort en houd deze op de plaats tussen duim en wijsvinger. Prik de naald loodrecht in het septum.

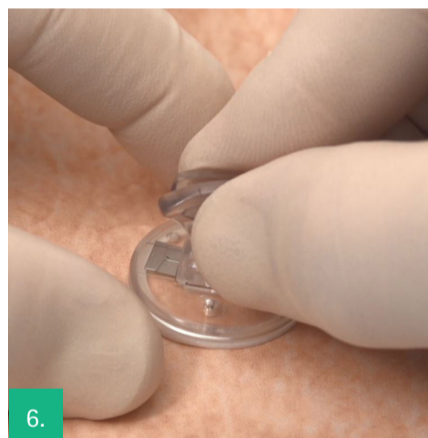

6. Prik de naald langzaam en zonder veel kracht door het septum de kamer in, totdat de naald de bodem raakt. Zorg ervoor dat de bodemplaat contact maakt met de huid.

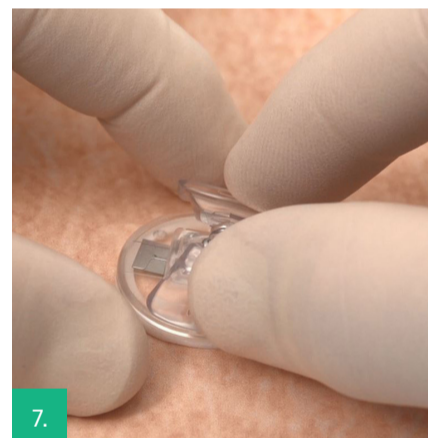


7. Laat de vleugels los en duw deze plat richting bodemplaat. Controleer volgens protocol of de naald een vrije doorgang heeft voor aspiratie en injectie.

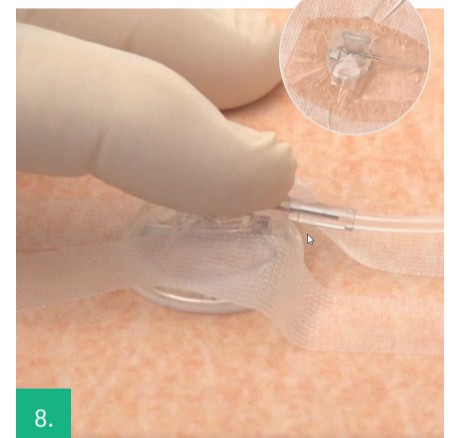


8. Fixeer de vleugels zodat de naald niet vrij kan bewegen. Dek de naald af met een transparante fixatiepleister volgens protocol.


### Verwijderen

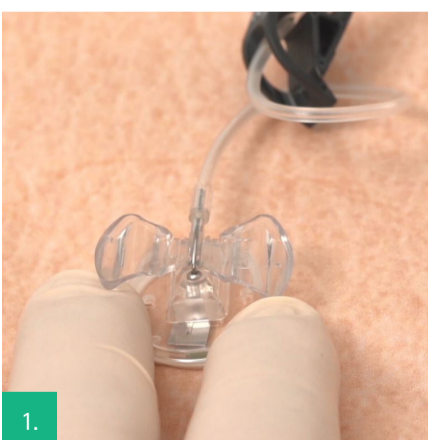

1. Houd met twee vingers de bodemplaat tegen de huid gedrukt.

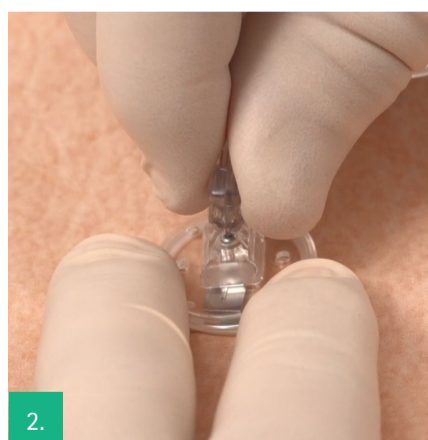

2. Buig met de andere hand de vleugels naar elkaar toe.

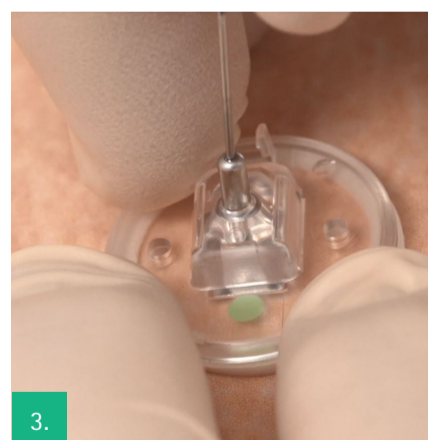

3. Trek de naald voorzichtig omhoog en houd hierbij de bodemplaat tegen de huid gedrukt. Er verschijnt een groene stip zodra het veiligheidsmechanisme geactiveerd is. Tevens is een klik hoorbaar.