


EASYPUMP® II


LES BONS RÉFLEXES DE MANIPULATION

REPLISSAGE DU DIFFUSEUR


Le remplissage des diffuseurs portables peut se faire à l'aide d'une seringue à embout Luer Lock en utilisant une technique aseptique. Amorcer la tubulure avec une solution de NaCl 0,9% avant l'ajout du traitement.

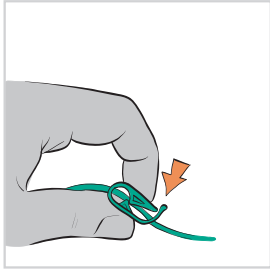


1. Fermer le clamp.

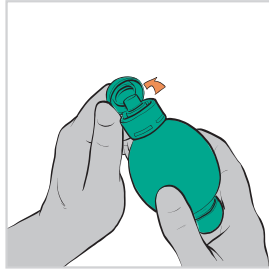


2. Ouvrir le clapet de protection de l'orifice de remplissage.

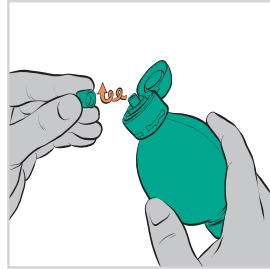


3. Dévisser le bouchon et le déposer sur une surface stérile.

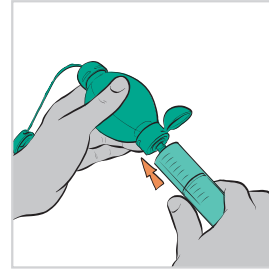


4. Connecter le dispositif de remplissage à l'orifice de remplissage, sans forcer.

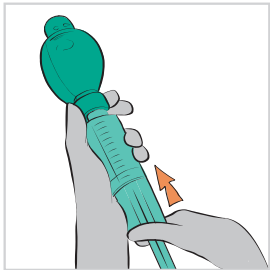


5. Remplir le diffuseur avec approximativement 10 mL de solution de NaCl 0,9%.

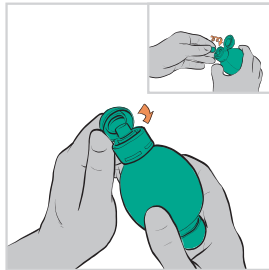


6. Déconnecter le système de remplissage puis revisser le bouchon sur l'orifice et rabattre le clapet de protection.

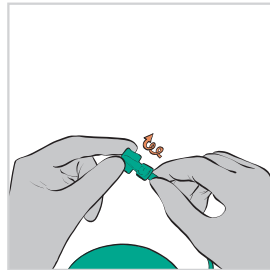


7. Ôter le capuchon de l'embout distal et ouvrir le clamp.

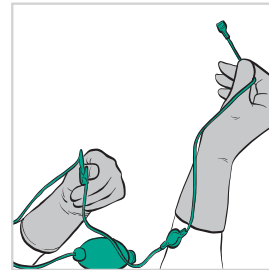

8. S'assurer que le filtre est maintenu vers le haut pendant le processus d'amorçage.

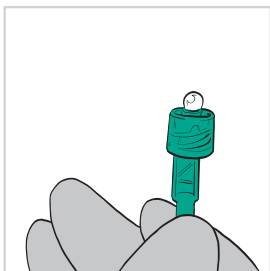

9. La tubulure est purgée lorsque la solution perle au niveau de l'embout distal.

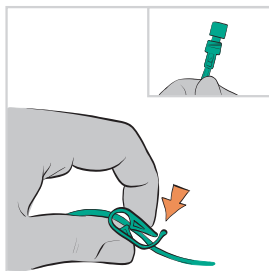


10. Refermer le clamp ainsi que le capuchon de l'extrémité distale.


AJOUT DE MÉDICAMENT

Se référer systématiquement à la notice fournie par le fabricant de médicament pour connaître les procédures de reconstitution / dilution et de stockage du médicament.


Remplir la seringue de 50 mL avec la solution diluée de médicament et purger l'air de la seringue.

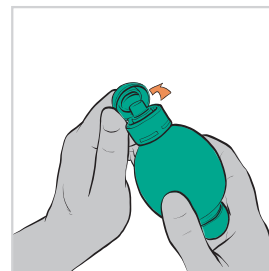


11. Soulever le clapet de protection.

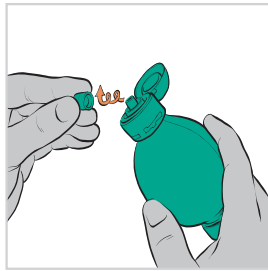


12. Dévisser le bouchon et le déposer sur une surface stérile.

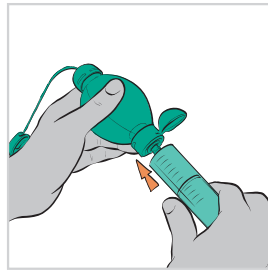

13. Connecter le dispositif de remplissage à l'orifice de remplissage.

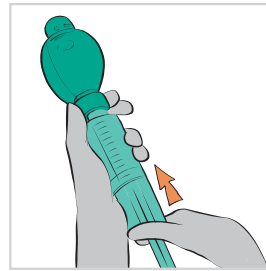


14. Remplir le diffuseur avec la solution médicamenteuse jusqu'à l'obtention du volume souhaité, sans dépasser le volume maximal recommandé.

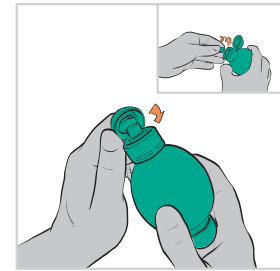


15. Revisser le bouchon sur l'orifice et rabattre le clapet de protection. **Le diffuseur est prêt à être connecté à l'abord vasculaire du patient.**


CONNEXION & PERFUSION

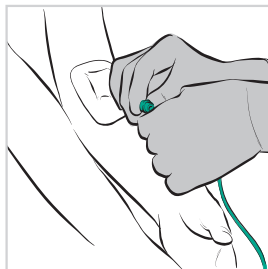


1. Retirer le capuchon de l'embout distal, purger et désinfecter le site d'accès veineux. Raccorder la tubulure au site d'injection.

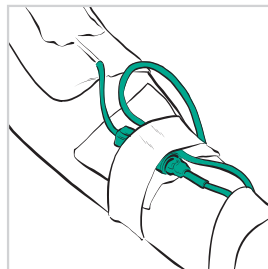

2. Veiller à placer le régulateur de débit au contact de la peau du patient. Le régulateur de débit se situe entre le filtre et l'extrémité distale de la tubulure. vous pouvez le fixer à la peau du patient avec des bandelettes de fixation ou un film de polyuréthane transparent.

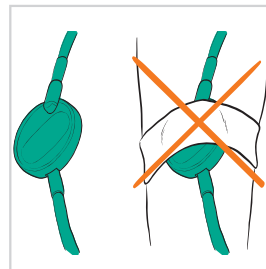

3. Assurez-vous que le filtre d'élimination d'air ne soit pas fixé sur la peau. Il doit rester au sec et n'être recouvert par aucun pansement.

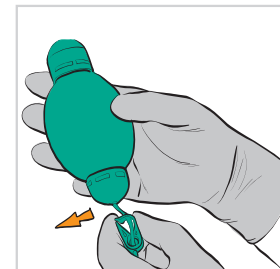

4. Démarrer la perfusion en ouvrant le clamp.

LE FILTRE NE DOIT PAS ÊTRE RECOUVERT



LE RÉGULATEUR DE DÉBIT DOIT ÊTRE FIXÉ SUR LA PEAU

La perfusion est terminée lorsque la membrane élastomérique est revenue à son état initial. Fermer le clamp et débrancher le diffuseur.

Lire attentivement la notice d'instructions avant l'utilisation du diffuseur portable Easypump® II.

B. Braun Medical S.A. | Lambroekstraat 5b | 1831 Diegem | Belgique
+32 (0)2 712 86 50 | customercare.be@bbraun.com | www.bbraun.be