

Intrafix® SafeSet Flush

Set de perfusion pour une administration médicamenteuse efficiente

- 1** PRÉPARATION DE LA TROUSSE PRIMAIRE (SE CHANGE 1X/24H) AVEC UNE SOLUTION DE RINÇAGE DE 150 ML (SUR BASE DE 5 RINÇAGES DE 30 ML/24H)




Fermez le clamp roulant de la trousse avant d'insérer le spike dans la poche à perfusion.

1. Trocardez la poche avec le spike de la tubulure principale.
2. Remplissez la chambre compte-gouttes jusqu'à l'anneau vert.
3. Ouvrez le clamp roulant.
4. Purgez toute la trousse.

Remarque : Le maintien des règles d'hygiène va de soi. Il n'est pas nécessaire de mettre des gants pour la pratique.

- 2** CONNEXION DE LA TROUSSE SECONDAIRE (À CHANGER À CHAQUE ADMINISTRATION DE MÉDICAMENT)

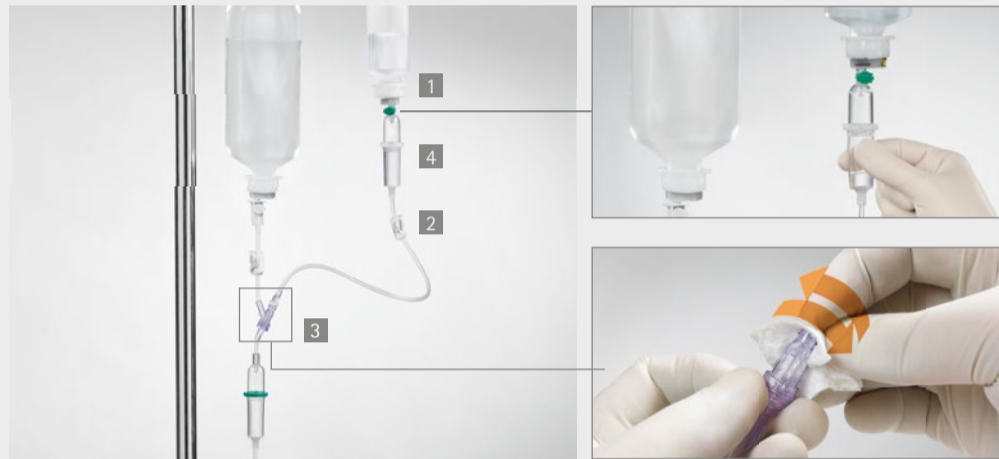

1. Trocardez la poche contenant la médication avec le spike de la tubulure secondaire.
2. Fermez le clamp blanc.
3. Désinfectez pendant minimum 15 sec. l'accès sans aiguille se trouvant sur la trousse principale et connectez la tubulure secondaire à la tubulure principale.
4. Remplissez la chambre compte-gouttes via 2 pressions minimum.
5. Il n'est pas nécessaire de rincer la tubulure secondaire (elle sera vide à la fin de la perfusion médicamenteuse).

- 3** DÉMARRAGE DE L'ADMINISTRATION **4** FIN DE L'ADMINISTRATION



1. Fermez le clamp blanc de la tubulure principale.
2. Ouvrez le clamp blanc de la tubulure secondaire.
3. Réglez le débit prescrit à l'aide du clamp roulant.



1. Fermez le clamp blanc de la tubulure secondaire lorsque le médicament a été totalement administré.
 2. Ouvrez le clamp blanc de la tubulure principale et la rincer pendant 25 secondes afin de perfuser environ 30 ml (simulation 20Gx25mm). Retirez la tubulure secondaire et éliminez-la dans le grand container ad hoc.
 3. La tubulure principale doit être jetée après 24h d'utilisation dans le container ad hoc (possibilité de placer le spike à l'arrière le clamp roulant).
- Remarque:** contrôlez le niveau de liquide dans la chambre compte-gouttes et, si nécessaire, remplissez-la jusqu'à ce que le niveau de liquide atteigne l'anneau vert.