

## 1 VOORBEREIDING



Bereiding van het geneesmiddel in een laminaire flow kast.

## 2 PRIME LINE



1. De luchtinlaat van de Cyto-Set Mix® gesloten houden bij een soepele zak. Bij het gebruik van een glazen flacon, deze openen.
2. Plaats de spike in de IV oplossing en purgeer de leiding.

## 3 CONNECTIE VAN DE SPUIT



1. Sluit de klem zo dicht mogelijk tegen het bijspuitpunt, zodat de medicatie zich niet kan mengen met de spoelvloeistof in de Cyto-Set® Mix.
2. Sluit de spuit naadloos aan op het voorziene bijspuitpunt. Bij aansluiting zal de poort automatisch worden geopend.

## 4 TOEDIENING



1. Injecteer het geneesmiddel in de container.
2. Zorg voor een goede menging van het cytostaticum door een of twee keer te aspireren. Als de spuit verwijderd wordt, sluit het naadloze bijspuitpunt automatisch.

## 5 DUID POORT AAN



Duid aan dat het naadloze bijspuitpunt gebruikt is door er een rode combi-stopper op aan te sluiten. De klem blijft gesloten.


## 6 VERVOER



De bereiding is klaar voor transport naar de afdeling.

# Cyto-Set® Mix – Bereiding van geneesmiddelen

### 1 SPIKE IN DE CONTAINER

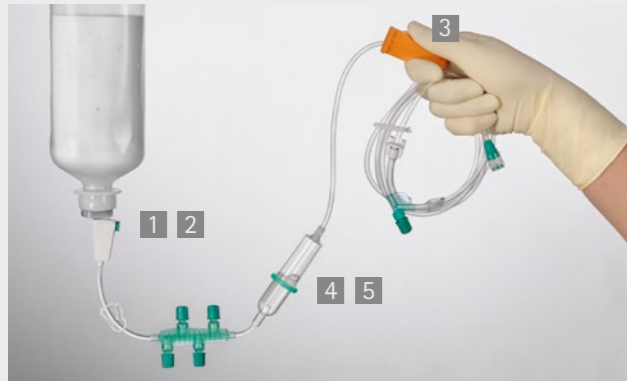

1. Sluit de beluchtingskap van de spike bij een soepele zak en open bij een glazen recipient.
  2. Plaats de spike in de container.
  3. Houd de druppelkamer ondersteboven, terwijl het systeem gevuld wordt.
- Open de rolklem en vul de kamer 2/3 van het onderste deel van de kamer.

### 2 PRIME LINE



1. **Lucht verwijderen uit de Cyto-Set® Infusomat® Space.** Als u een Cyto-Set® Infusomat® Space gebruikt, moet u het pompsegment ondersteboven houden. De PrimeStop zal het uitvloeien van de vloeistof verhinderen.
2. **De Cyto-Set® Infusion / Infusomat® Space verbinden met de patiënt.** Open de rolklem. De infusievloeistof begint te stromen.

### 3 EERSTE AANSLUITING



Na het verwijderen van de PrimeStop van de medicatie lijn, kan je deze aansluiten op één van de bijspuitpunten op de hoofdlijn. Schroef deze vast tot je een 'klik' hoort. Dan is de connectie veilig tussen medicatie en hoofdlijn.

### 4 START VAN GENEESMIDDELINFUUS



1. Sluit de witte klem op de IV-set.
2. Open de witte klem op de Cyto-Set® Mix.

### 5 IV-SET SPOELEN



1. De geneesmiddelencontainer zal leeglopen tot aan de AirStop. Sluit de clip van de Cyto-Set® Mix zo dicht mogelijk tegen de hoofdlijn.
2. Om te spoelen open je de clip tussen de kamer en de spolvloeistof. Met de pomp of rolklem zal je de infusiesnelheid bepalen.

### 6 TWEDE AANSLUITING



1. Sluit de klem van de IV-set.
2. Open nu de klem op de volgende Cyto-Set® Mix.
3. Met het naaldvrije bijspuitpunt aangesloten, kunt u tot vier Cyto-Set® Mix-eenheden aansluiten.

### 7 IV-SET SPOELEN



Na iedere medicatie laat je deze geconnecteerd aan de hoofdleiding mits het sluiten van de clip. Na iedere therapie is het spoelen noodzakelijk.

### 8 WEGGOOIEN



Het IV toedieningssysteem kan nu in zijn totaliteit ontkoppeld worden van de patiënt en veilig als een **gesloten systeem worden weggegooid**, volgens de interne procedures.

# Cyto-Set® AirStop - Toediening van geneesmiddelen