

# Intrafix<sup>®</sup> SafeSet Flush


Infuus set voor een efficiënte toediening van medicatie

- 1** KLAARMAKEN VAN DE LANGE ZIJLEIDING (PER 24U VERVANGEN) MET SPOELZAK 150ML (5 TOEDIENINGEN / 24U)



1. Breng de spike van de lange zijleiding in de infuuszak.
2. Vul de druppelkamer tot aan de groene ring.
3. Open de rolklem.
4. Purgeer de infuusset en PrimeStop.
5. Sluit de rolklem.

- 2** CONNECTEER DE KORTE ZIJLEIDING (BIJ ELKE NIEUWE TOEDIENING EEN NIEUWE ZIJLEIDING!)

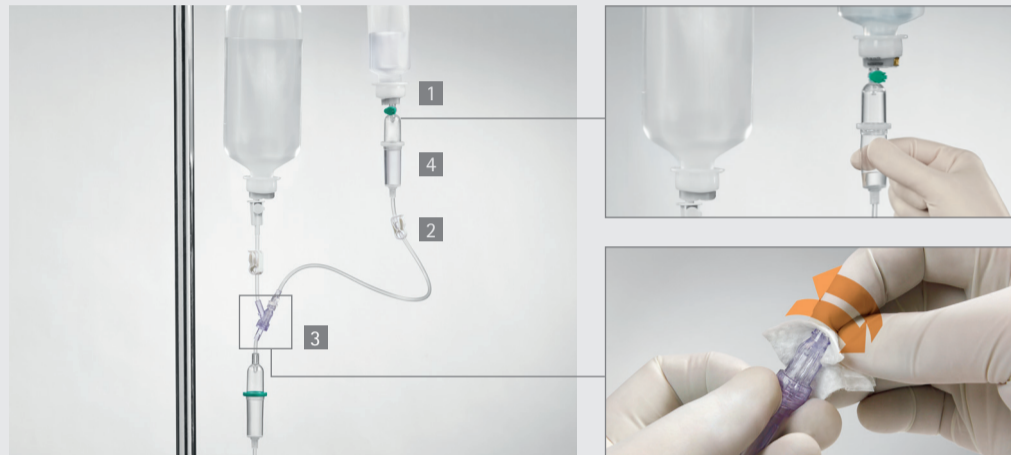

1. Sluit de witte klem.
2. Breng de spike van de korte zijleiding in de medicatie.
3. Ontsmet de naaldloze connector op de lange zijleiding volgens procedures en connecteer de korte zijleiding op de naaldloze connector van de lange zijleiding.
4. Vul de druppelkamer.
5. Het is niet nodig om de korte zijleiding te ontluichten.

- 3** START DE TOEDIENING



1. Sluit de witte klem van de lange zijleiding.
2. Open de witte klem van de korte zijleiding.
3. Stel de juiste infuussnelheid in met de rolklem.

- 4** EINDE VAN DE TOEDIENING



1. Sluit de witte klem van de korte zijleiding als de medicatie volledig is ingelopen.
2. Open de witte klem van de lange zijleiding en spoel de hoofdleiding gedurende 25 seconden voor 30ml te infuseren (simulatie: 20Gx25mm), verwijder terwijl de korte zijleiding.
3. Na 24u gebruik van de lange zijleiding mag deze in de afval zak gegooid worden indien de spike beveiligd is.

**Opmerking:** Controleer altijd het vloeistofniveau in de druppelkamer en indien nodig hervul het vloeistofniveau tot aan de groene ring.