




Recommandation de meilleures pratiques pour la préparation d'Intrafix® Primeline et Intrafix® SafeSet en combinaison avec des contenants/sacs à perfusion.

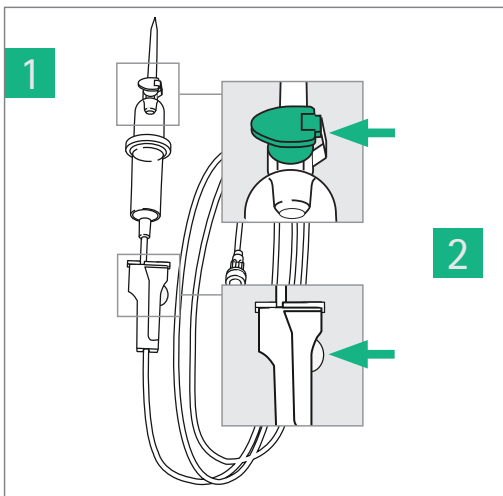


Retirez le set IV de son emballage et vérifiez que la prise d'air verte est fermée et que le clamp roulant est ouvert.

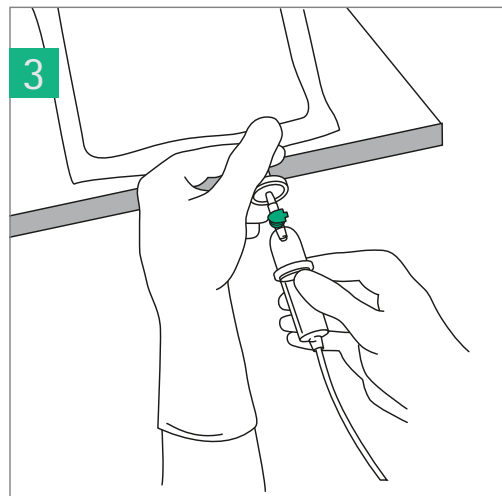


Fixez le contenant/sac à perfusion.

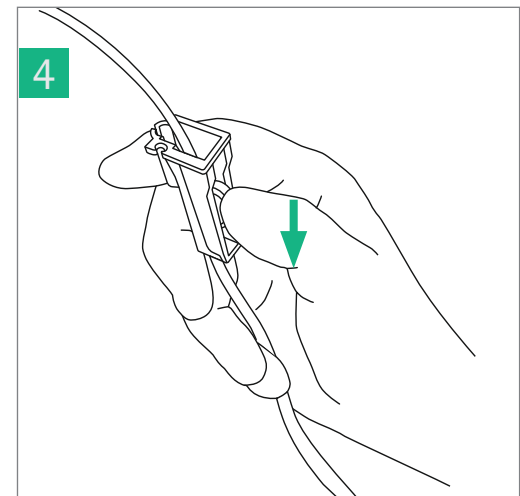


Fermez le clamp roulant.

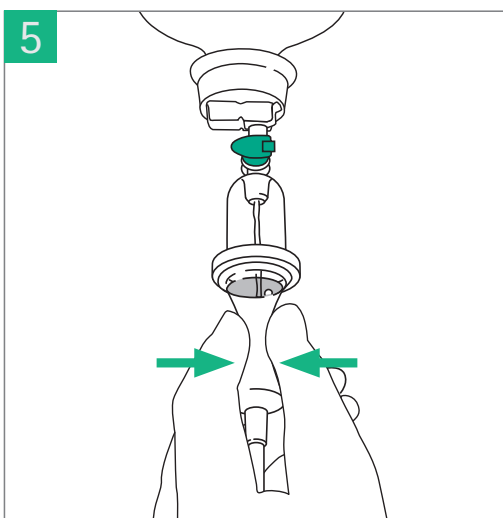

Retournez le système de perfusion. Appuyez sur la chambre compte-gouttes pour faire monter le niveau du liquide jusqu'à l'anneau.

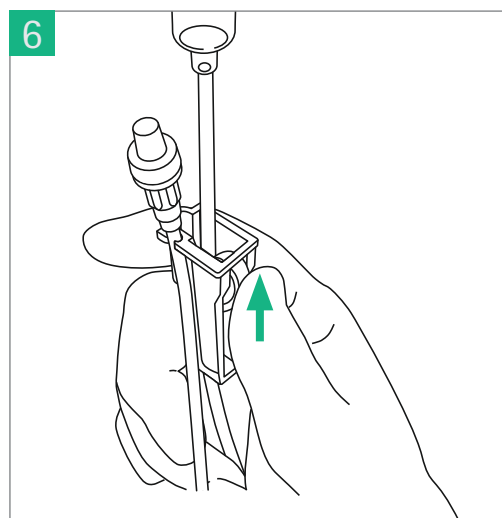

Ouvrez le clamp roulant. Rincez la ligne à perfusion jusqu'au bout. Refermez ensuite le clamp roulant.

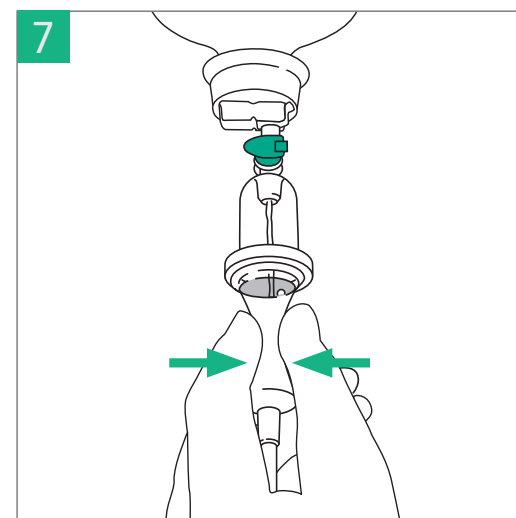

Appuyez à nouveau sur la chambre compte-gouttes. Enlevez le capuchon protecteur et raccordez-le à la voie veineuse du patient.



Scannez et découvrez
nos lignes de perfusion.