



Recommandation de meilleures pratiques pour la préparation d'Intrafix® Primeline et Intrafix® SafeSet en combinaison avec un contenant semi-rigide (Ecoflac®) ou un flacon en verre.

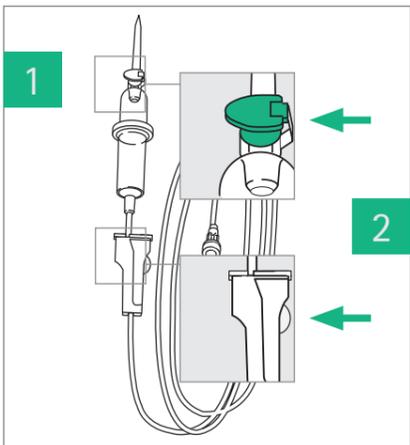


1 Retirez le set IV de son emballage et vérifiez que la prise d'air verte est fermée et que le clamp roulant est ouvert.

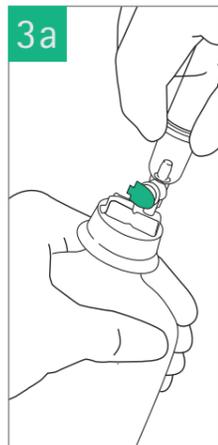


3a Fixez le contenant semi-rigide (Ecoflac®) ou le flacon en verre.




3b

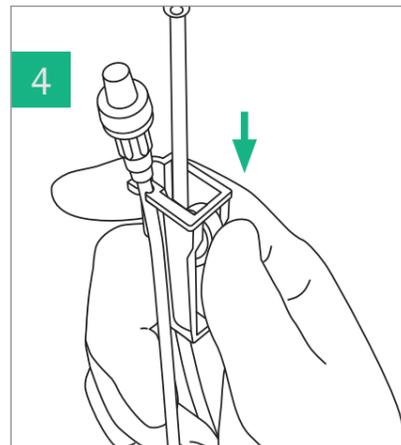


4 Fermez le clamp roulant

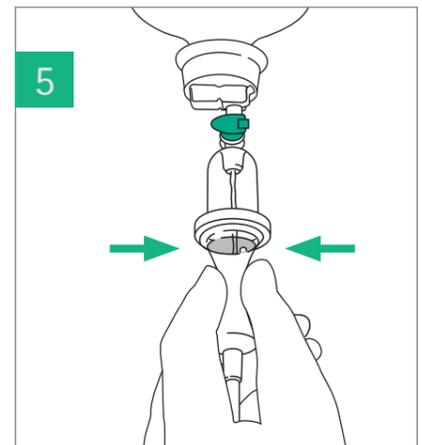


5 Retournez le système de perfusion. Appuyez sur la chambre compte-gouttes pour faire monter le niveau du liquide jusqu'à l'anneau.

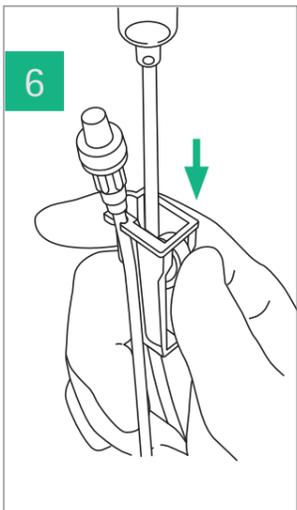



6 Ouvrez le clamp roulant.

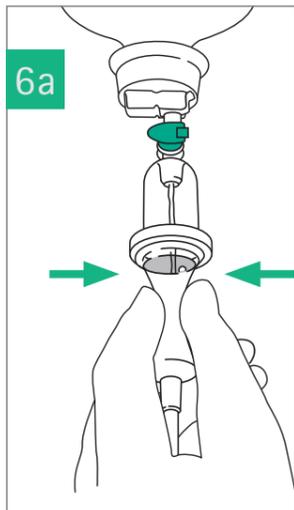

6a Appuyez à nouveau sur la chambre compte-gouttes.

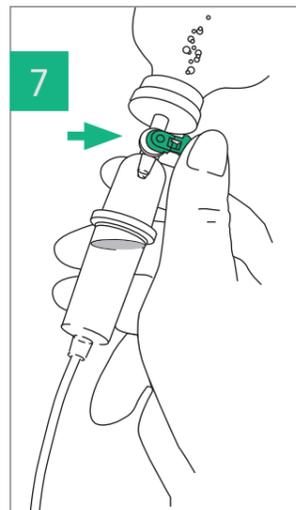

7 Ouvrez maintenant la prise d'air verte. (Vous verrez des bulles monter dans le flacon.)

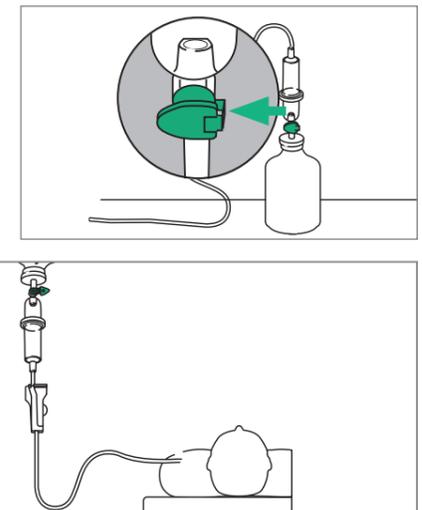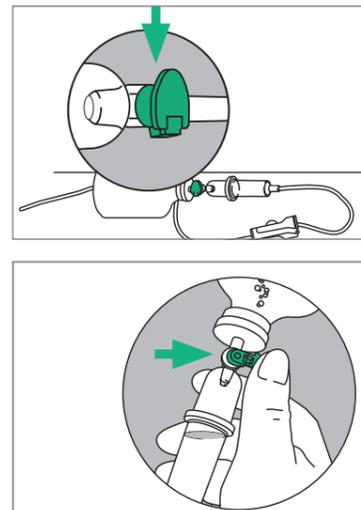

Important : lorsque le système de perfusion purgé est posé à l'horizontale, par exemple sur un plateau ou si le flacon est posé sur une table, il est impératif de fermer la prise d'air verte. Ne rouvrez cette prise d'air qu'une fois la perfusion enclenchée.



Scannez et découvrez nos lignes de perfusion.